

RÉSULTAT
IMMÉDIAT

EFFET
TENSEUR

COMPOSÉ
RÉSORBABLE



SILHOUETTE SOFT®

REPOSITIONNE LES VOLUMES
ET REDESSINE LES LIGNES
DE VOTRE VISAGE

Les sutures Silhouette Soft® sont indiquées pour une utilisation en chirurgie plastique et reconstructive dans les procédures chirurgicales et esthétiques afin d'élever et de repositionner le relâchement cutané pour restaurer ou améliorer l'apparence du visage d'un patient.(1) Notice produit.

Les sutures Silhouette Soft® sont des sutures résorbables, stériles, faits en acide polylactique avec des cônes moulés en un matériau bio-résorbable (Lactide / Glycolyde) et fixés sur le fil. Elles sont fabriquées à partir d'un matériau de suture poly acide lactique de taille USP 3-0 et une teneur de résine bio-résorbable implantable. Les fils de sutures de 30 centimètres (PN - 22-PL3.0.1-NA) ou de 26.8 centimètres (PN - 25-PL3.0.1-NA) sont fixés à deux aiguilles de 12 cm. Tous les produits sont fournis stériles (EO) et sont destinés à un usage unique. (1) Notice produit.

 Silhouette Liff Inc,
1 Technology Drive, F 211
Irvine, CA 92618 - USA

EC

REP

Sinclair Pharmaceuticals Ltd,
Chester Business Park
Chester, CH4 9QZ - UK

 0499



LE VIEILLISSEMENT CUTANÉ

Le processus

Le vieillissement est un processus naturel et progressif qui débute dès l'âge de 20 ans et dont les marques apparaissent particulièrement sur le visage.^(2,3)

L'environnement

Ce phénomène est accentué par les facteurs environnementaux tels que la pollution, l'exposition au soleil, le stress ou le tabagisme.

Les conséquences sur la peau

Pour comprendre comment il est possible de rajeunir l'apparence du visage avec des traitements injectables, il est important de connaître la composition de notre peau.⁽⁴⁾

► Le collagène et l'élastine sont responsables du support et de l'élasticité de notre peau.

Avec l'âge, ces deux éléments diminuent et notre peau perd en élasticité et en soutien, ce qui entraîne la formation de rides d'expression mais aussi de plis et de sillons.

► L'acide hyaluronique

joue un rôle dans l'hydratation et le maintien du volume de notre peau.

Avec l'âge les cellules perdent leur capacité à produire de l'acide hyaluronique.

La peau se déshydrate, entraînant ainsi la formation de rides.

► La graisse est un composant majeur de la peau de notre visage.

Avec l'âge, la quantité de graisse de la peau diminue, laissant apparaître des pertes de volume au niveau des pommettes, vallée des larmes ou même du menton.

(2) Varani and al. Decreased collagen production in chronologically aged skin. American Journal of Pathology, Vol. 168, N°6, June 2006.

(3) Wulc A. E. and al. The Anatomic Basis of Midfacial Aging. Midfacial Rejuvenation, DOI 10.1007/978-1-4614-1007-2-2.

(4) Murina A.T.: Mechanisms of skin aging. Cosmet Dermatol. 2012; 25: 399-402.

LES PRINCIPALES ZONES TOUCHÉES PAR LE VIEILLISSEMENT⁽⁴⁾



Simulation du vieillissement par ordinateur

Triangle de l'âge
Âge : 25-40 ans



Triangle
du vieillissement
Âge : 55-65 ans



Tempes

Pommettes

Creux des joues

Sillons nasogéniens

Bajoues



QU'EST-CE QUE LE TRAITEMENT SILHOUETTE SOFT® ?

Silhouette Soft® est un **fil tenseur** sur lequel sont disposés de **petits cônes** qui permettent au fil de bien **s'ancrer dans les tissus**. Fil et cônes sont constitués de **matériaux biocompatibles** et **résorbables**, utilisés depuis de nombreuses années dans diverses spécialités médicales.

C'est un traitement innovant pour lutter efficacement contre le relâchement cutané de votre visage.

1

Effet tenseur

Silhouette Soft® offre un effet liftant et tenseur, immédiat et durable.

Les volumes du visage sont dès lors repositionnés et les lignes redessinées.

DOUBLE EFFET



2

Effet stimulant

L'effet biostimulant des fils Silhouette Soft® permet un ancrage profond des fils sous la peau.


Silhouette Soft® est un traitement peu invasif qui vous permet de reprendre une vie sociale immédiate.

Les résultats du traitement Silhouette Soft® sont immédiats et durables.

QUELLES ZONES PEUT-ON TRAITER AVEC SILHOUETTE SOFT®?



Le traitement Silhouette Soft® est la **référence pour traiter le relâchement cutané de l'ovale de votre visage** (bajoues) ainsi que des **joues** et des **pommettes** lorsque vous ne souhaitez pas avoir **recours à la chirurgie**.

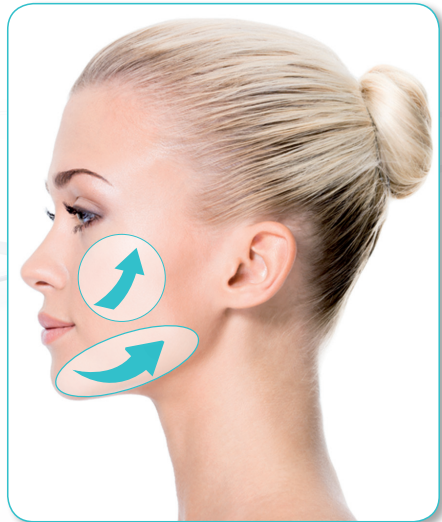



COMMENT SE DÉROULE LE TRAITEMENT SILHOUETTE SOFT® ?

Le traitement est-il douloureux ?

- Pour améliorer le confort au moment de la pose, les fils tenseurs Silhouette Soft® sont insérés sous la peau grâce à des aiguilles fines après une rapide anesthésie locale.

En combien de temps et où se réalise le traitement ?

- La procédure dure environ 30 minutes et s'effectue au cabinet médical.
- Le traitement Silhouette Soft® doit être réalisé par un médecin préalablement formé à cette technique.

Les produits sont-ils bien tolérés ?

- Les produits Silhouette Soft® sont rigoureusement testés, ce qui garantit une sécurité maîtrisée.
- La vie sociale n'est pas altérée après le traitement.
- Parfois, une légère dépression ou des irrégularités de la peau peuvent apparaître au niveau des points d'entrée des aiguilles mais elles disparaissent quelques jours après le traitement.
- Des légers œdèmes ou des ecchymoses peuvent également apparaître suite au traitement.

En cas d'effets indésirables, consultez votre médecin.

CONSEILS POUR OPTIMISER VOTRE TRAITEMENT SILHOUETTE SOFT®



Appliquez des compresses froides immédiatement après la procédure si nécessaire. ◀

Prenez un antalgique comme le paracétamol en cas de douleur. ◀

Dormez sur le dos, la tête rehaussée sur des oreillers (3/5 nuits). ◀

Lavez et séchez votre visage délicatement sans frotter (5 jours). ◀

Maquillez-vous 24 heures après le traitement. ◀

PENDANT 2 SEMAINES

Évitez la surexposition
au soleil et ne faites
pas d'UV.

Évitez
les mouvements
excessifs du visage.

Évitez le sport, notamment
les sports traumatisants
comme la course à pied.

PENDANT 3 SEMAINES

Ne faites ni de sauna
ni de hammam.

Évitez toute
chirurgie dentaire.

PENDANT 4 SEMAINES

Évitez tout massage
et tout soin esthétique du visage.



QUESTIONS FRÉQUENTES

Qui va réaliser mon traitement ?

Seul un médecin formé à la pose de Silhouette Soft® pourra réaliser ce traitement. Il est important d'aborder avec lui toutes les questions que vous vous posez, afin de bien comprendre les traitements qui s'offrent à vous, leurs avantages et leurs coûts.

Y-a-t-il des effets indésirables ?

Il peut y avoir une inflammation aigüe minimale des tissus, ainsi qu'une douleur localisée ou un œdème. Le risque d'inflammation et d'echymose existe mais est largement inférieur aux techniques traditionnelles plus invasives. Une sensibilité aux matériaux et réactions allergiques chez les patients post-intervention doivent être signalés. L'implantation de corps étrangers peut mener à des réactions histologiques.⁽¹⁾

Précautions d'emploi :

Dans la manipulation de la suture et tout autre matériau de suture, des soins particuliers doivent être pris afin d'éviter d'éventuels dommages. Éviter d'écraser ou d'endommager les sutures. Le placement superficiel sous-cutané des sutures peut les rendre visibles ou conduire à leur extrusion.⁽¹⁾

L'esthétique médicale avec Silhouette Soft®,
faites confiance à notre expérience.
PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN.



Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur les fiches produits.

(1) Notice produit.

SINCLAIR PHARMA FRANCE
35 rue d'Artois, 75008 Paris, France